




## SKIN PERFECTOR

La thérapie la plus efficace  
pour la méso-stimulation

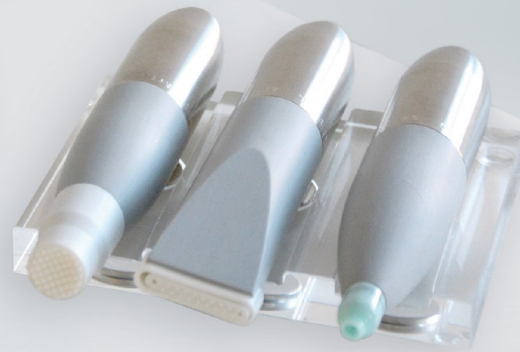


Le petit appareil le plus efficace pour tous les centres de beauté qui souhaitent se concentrer sur la forme traitante de la cosmétique:

3 fonctions sont proposées avec l'appareil

- **1ère fonction: micro dermabrasion**
- **2ème fonction: mesostimulation (linéaire) avec Lift L**
- **3ème fonction: mesostimulation locale avec Lift S**



## Résultat acides de fruits + Skin perfector

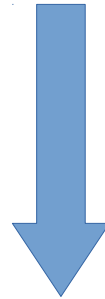

Résultats après 6 semaines  
( 6 séances)



## VOS ATOUTS

Sans acides de fruits = Le traitement peut s'effectuer toute l'année.

Non invasif, ne cause aucun dommage à l'épiderme ou au derme.

Séduit de nouveaux clients (il complète les traitements de remplissage et/ou de Botox)

Renforce votre crédibilité en tant qu'experte de la peau

Un investissant modéré pour un meilleure rentabilité





## 1ère fonction: micro-dermabrasion / peeling

En raison de la conception spéciale de la tête de dermabrasion, les cellules mortes de la peau deviennent molles et sont ainsi peu à peu supprimées.

De plus, les vibrations mécaniques de l'appareil permettent de stimuler la production de collagène dans la peau.

### Les Effets

- élimination douce à intensive des cellules mortes de la peau
- affiner la structure de la peau
- amélioration de la peau: rides et cicatrices
- stimulation de la circulation sanguine et cellulaire
- activité métabolique (via le système lymphatique)
- amélioration de l'absorption des produits grâce aux micro-canaux
- meilleure hydratation: perte d'humidité transépidermique réduite

### Recommandée :

- pour tous les types de peau
- peau très corné
- peau épaisse et pores dilatés
- peau grasse
- peau abîmée par le soleil
- ridules

- Peut s'utiliser également possible en été!



## **Contre-indications: microdermabrasion et meso-stimulation**

La micro-dermabrasion et la meso-stimulation ne doivent être utilisées que par des personnes spécialement formées et esthéticiennes !

### **Pas de traitement en cas de :**

- Cancer de la peau ou tumeur suspectée
- Troubles de la production d'hémoglobine
- Utilisation à long terme des anticoagulants
- Cortisone, médicament anti-acné tel que Roaccutan (le traitement est possible alors seulement après 12 mois)
- Fièvre aiguë
- Herpès - boutons de fièvre

Infections bactériennes (par exemple furoncles, anthrax, tuberculose)

- Verrues et taches de naissance élevées
- Cicatrices chéloïdes
- Psoriasis
- Eczéma sur le site à traiter
- rosacée

## 2ème fonction: méso-stimulation cutanée (linéaire) avec Lift L

Une méthode de traitement non invasive unique qui peut être utilisée de manière confortable (non douloureuse) pour stimuler l'épiderme.

Les actifs hautement concentrés à faible poids moléculaire peuvent ainsi pénétrer l'épiderme plus rapidement, plus profondément et en plus grande quantité.

La longueur des aiguilles en nylon médical et l'impacte sont parfaitement maîtrisés pour ne pas affecter le derme.

Aucun dommage n'est suscité mais l'épiderme est méthodiquement stimulé.

Les fibroblastes se relancent en ouvrant plus de 500 000 micro canaux dans la peau de manière mécanique.

C'est ainsi que les produits Janssen hautement concentrés peuvent être appliqués plus profondément sur la peau.

### Avantages:

- Activation de la régénération cellulaire naturelle
- **Micro-circulation** améliorée
- Activation des fibroblastes
- Amélioration de la division cellulaire





### Informations techniques pour la pièce à main Lift L:

Au niveau I: 2600 mouvements haut / bas / minute x 20 aiguilles x 10 minutes de stimulation = 520 000 micro canaux

Au niveau II: 3300 mouvements haut / bas / minute x 20 aiguilles x 10 minutes de stimulation 660 000 micro canaux

Au niveau III: 3800 mouvements haut / bas / minute x 20 aiguilles x 10 minutes de stimulation = **720 000** micro canaux

**Aucun appareil sur le marché ne peut égaler cela !**

Les simples appareils derma à aiguilles atteignent en moyenne 80 000 stimuli micro-canaux  
De plus, les risques de lésions cutanées et de saignements sont élevés.

Des études ont montrées qu'il n'est absolument PAS nécessaire d'aller plus profondément que 0,35 mm pour stimuler à la fois le derme et l'épiderme.

Le risque de lésion cutanée et de saignement est réel à partir de 0,5 mm .

C'est la différence la plus importante que le Skin Perfector de Janssen cosmetics possède en comparaison avec les stylos et rouleaux derma classiques!

**Avec le SKIN PERFECTOR, nous travaillons de manière NON INVASIVE, SÛRE avec des RÉSULTATS étonnants!**

### **3ème fonction: méso-stimulation locale avec casque Lift S**

C'est l'alternative à la thérapie par injections (botox Botox® ou traitements de comblement). Nous aborderons avec cet appareil, les problèmes de peau locaux de manière ciblée et précise.

Effets et avantages:

- Les rides et les cicatrices sont volontairement stimulées pour être atténuées par mésostimulation
- Meilleure production des fibre de collagène et d'élastine
- Une forte dose de produits hautement concentrés comble les rides
- Stimulation locale du renouvellement naturel de la peau

Bénéfique pour:

- Rides d'expression
- Rides profondes
- Rides labiales nasales (p. Ex. Fumeurs)
- Cicatrices d'acné
- Cicatrices après chirurgie (sauf cicatrices chéloïdes)
- Cicatrices après la varicelle



- Supprimer les taches de vieillesse




### **Protocole de 4 semaines**

Semaine 1: Exfoliator 20 + perfector de peau

Semaine 2: Exfoliator 30 + perfector de peau

Semaine 3: Exfoliator 40 + perfector de peau

Semaine 4: Exfoliator 60 + perfector de peau

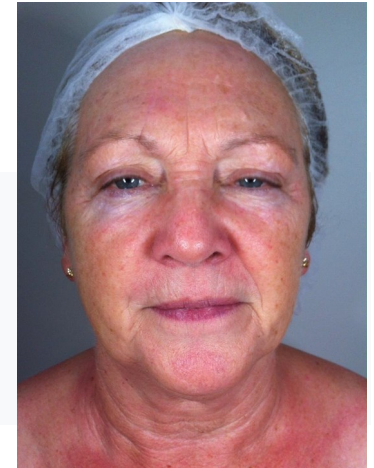

### Parlons impact pour votre institut :

⌈

Prix moyen d'un traitement aux acides de fruits + Skin Perfector **120 euros**

Vendre ce soin en cure de 6 = 720 euros

vous attirez une nouvelle clientèle qui souhaitent profiter de l'avancement des technique de derma-esthétique dans la cosmétique sans les procédures chirurgicales.

Leu budget est ciblé pour du résultat. Vous devenez un esthéticienne experte, une véritable coach de l'épiderme.

Votre appareil est amorti après seulement 5 cures vendues.



## LE FUTUR DES SOINS DE LA PEAU